



PESAPERSONE PROFESSIONALE MOD 960A/ R150A /RG200A

MANUALE ISTRUZIONI



Leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo dello strumento

INDICE

2.	DISPOSIZIONI GENERALI.....	PAG. 2
3.	SICUREZZA- USO PREVISTO.....	PAG. 2
4.	SPECIFICHE TECNICHE.....	PAG. 3
5.	ISTRUZIONI PER L'USO.....	PAG. 4
6.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA.....	PAG..6
7.	CONFORMITA'.....	PAG. 6
8.	TARGHETTE IDENTIFICATIVE.....	PAG. 6
9.	ROTTAMAZIONE e SMALTIMENTO.....	PAG. 7
10.	GARANZIA.....	PAG. 7
11.	ASSEMBLAGGIO- UTILIZZO STATIMETRO TELESCOPICO.....	PAG. 8

Scegliendo la pesapersone professionale meccanica **WUNDER mod.960A/ R150A RG200A** avete acquistato un apparecchio di alta precisione e qualità.

Da oltre 40 anni **WUNDER** mette la propria esperienza al servizio della salute.

La pesapersone meccanica **Wunder mod.960A/R150A/RG200A** sono conforme alle norme vigenti in ospedali, ambulatori medici e istituti di cura con ricovero.

Le pesapersone **960A/R150A/RG200A** sono prodotti medicali di classe Im con dispositivo di misura e sono tarate in conformità alla classe di precisione IIII (secondo le norme 93/42 e 90/384 CEE).

2. DISPOSIZIONI GENERALI



ATTENZIONE!

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo dello strumento in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la SICUREZZA D'USO E MANUTENZIONE.

Le descrizioni e le illustrazioni, fornite in questo manuale, si intendono non impegnative.

WUNDER si riserva il diritto di apportare le modifiche che riterrà convenienti a scopo di miglioramento, senza impegnarsi ad aggiornare questa pubblicazione.

Il Servizio Assistenza Clienti è a disposizione per ulteriori informazioni sull'uso, sulla manutenzione e sull'assistenza di questo prodotto.

Convenzioni: In questo manuale sono stati adottati i seguenti simboli



0291 MARCATURA CE DEL TIPO PER USO MEDICALE



CERTIFICAZIONE E OMOLOGAZIONE METROLOGICA



CLASSE DI PRECISIONE



CERTIFICATO DI GARANZIA ASSISTENZA

ATTENZIONE!



POSIZIONATO PRIMA DI DETERMINARE DELLE PROCEDURE. LA SUA INOSSERVANZA PUO' PROCURARE DANNI ALL'OPERATORE O AL PAZIENTE E AL PRODOTTO

3. SICUREZZA

Gli operatori devono leggere attentamente il presente manuale, attenersi alle istruzioni in esso contenute e familiarizzare con le procedure corrette d'uso e di manutenzione dello strumento.

La casa costruttrice non si assume alcuna responsabilità per i danni diretti o indiretti, compresa la perdita di utili, o per qualsiasi altro danno di natura commerciale che possa derivare dall'uso del prodotto non conforme a quanto descritto nel presente manuale.

- Conservare questo manuale per consultazione e a supporto dell'addestramento del personale
- Non sovraccaricare lo strumento oltre il valore di portata massima
- Non applicare i carichi in modo brusco.
- Non utilizzare oggetti taglienti o appuntiti per premere i tasti
- Non tentare di aprire lo strumento.
- Non rimuovere i sigilli di conformità presenti sullo strumento.
- Non immergere lo strumento in acqua o altri liquidi
- Fate eseguire regolarmente le operazioni di manutenzione e le verifiche metriche successive

3.1 Uso previsto

Tale dispositivo è destinato ad essere utilizzato per pesare le persone, in sede di ambulatorio medico, a scopo diagnostico generale.


Ambiente d'uso: in sede di ospedali e cliniche mediche, ambulatori medici. Il locale di installazione deve essere dotato di impianto elettrico conforme alle norme in vigore. Si raccomanda di utilizzare la bilancia in ambienti non esposti a interferenze magnetiche.

Personale destinato all'uso del prodotto: operatori e medici che abbiano dimestichezza con il prodotto.




Controllo e Responsabilità: il dispositivo medico deve essere utilizzato sotto la supervisione di un medico qualificato o personale qualificato addetto alla manutenzione e verifiche periodiche.









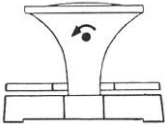
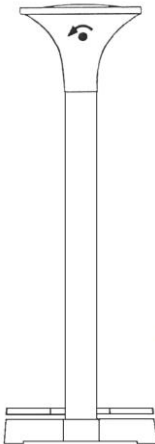
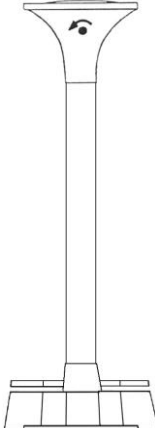
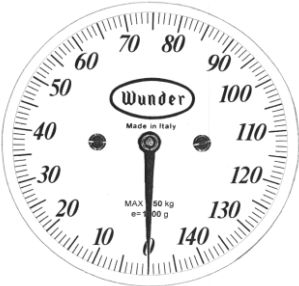
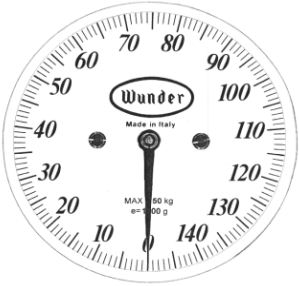
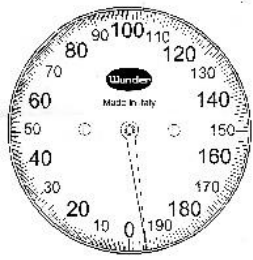
Limiti d'uso: tale dispositivo medico può essere utilizzato solamente come descritto nel presente manuale.

4. SPECIFICHE TECNICHE

Modello	960A	R150A colonna	RG200A colonna
			
Capacità	150 kg	150kg	100-200 kg
Divisione	1000g	1000g	500-1000g
Fabbricante	Wunder Sa.bi.srl Trezzo S/Adda Milano Italy		
Approvazione OIML	Classe IIII	Classe IIII	Classe IIII
Unità di misura	Kg		
Temperatura operativa	da +10°C a +40°C		
Accessori possibili		Statimetro telescopico 60-200cm:1cm -2~6.6FT	Statimetro telescopico 60-200cm :1cm- 2~6.6FT

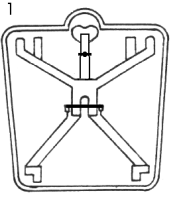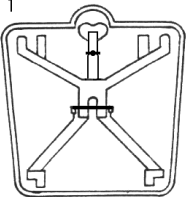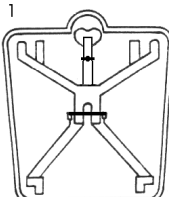5. ISTRUZIONI PER L'USO

960A	R150A colonna	RG200A colonna
<p>Il strumento si presenta completo pronto per l'utilizzo senza accessori da montare.</p> <p>-Manuale di istruzioni</p>	<p>Il strumento si presenta completo pronto per l'utilizzo senza accessori da montare.</p> <p>Possibili accessori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statimetro ad asta 65-200cm; - Ruote per il trasporto. - Manuale di istruzioni 	<p>Il strumento si presenta completo pronto per l'utilizzo senza accessori da montare.</p> <p>Possibili accessori:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Statimetro telescopico 60-200cm; -Ruote per il trasporto. - Manuale di istruzioni.
960A Legenda	R150A Legenda	RG200A Legenda
		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Testa con quadrante analogico 2. Pedana rivestita in gomma 3. Base 4. Indicatore del peso 5. Vite regolazione dello zero 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Testa con quadrante analogico 2. Pedana rivestita in gomma 3. Base 4. Indicatore del peso 5. Vite regolazione dello zero 6. Colonna <p>SOLO CON FORNITURA STATIMETRO</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Statimetro con staffa di supporto (accessorio) 8. Stati metro telescopico (accessorio). 9. Kit ruote trasporto (accessorio solo su richiesta) <p>Nota: per modello RG200A la staffa(7) supporto statimetro misura altezza è già fissata sulla colonna.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Testa con quadrante analogico 2. Pedana rivestita in gomma 3. Base 4. Indicatore del peso 5. Vite regolazione dello zero 6. Colonna <p>SOLO CON FORNITURA STATIMETRO</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Statimetro con staffa di supporto (accessorio) 8. Stati metro telescopico (accessorio). 9. Kit ruote trasporto (accessorio solo su richiesta) <p>Nota: per modello RG200A la staffa(7) supporto statimetro misura altezza è già fissata sulla colonna.</p>
960A Preparazione all'uso	R150A Preparazione all'uso	RG200A Preparazione all'uso

960A Preparazione all'uso	R150A Preparazione all'uso	RG200A Preparazione all'uso
		
 	 	
<p>1. Capovolgere lo strumento: togliere la fascetta rossa e svitare la vite a farfalla rossa per sbloccare il meccanismo delle leve.</p>	<p>1. Capovolgere lo strumento: togliere la fascetta rossa e svitare la vite a farfalla rossa per sbloccare il meccanismo delle leve.</p>	<p>1. Capovolgere lo strumento: togliere la fascetta rossa e svitare la vite a farfalla rossa per sbloccare il meccanismo delle leve.</p>
<p>2. 960A</p>	<p>2. R150A</p>	<p>2. RG200A</p>
		
<p>2. Posizionare lo strumento su una superficie piana per ottenere affidabilità nella misurazione del peso.</p>		
<p>3</p> 	<p>3</p> 	<p>3</p> 
<p>3. Accertarsi che l'indice del peso (lancetta) sia sullo zero. Se non fosse posizionato correttamente a zero agire manualmente con la vite di regolazione posizionata dietro la testa della strumentazione.</p>		
<p>4. Salire sulla base (pedana) della bilancia e Leggere il peso attraverso l'indicazione della lancetta.</p>		

6. MANUTENZIONE E ASSISTENZA



ATTENZIONE!

Si raccomanda di mantenere sotto controllo lo strumento in dotazione con una corretta manutenzione periodica, con periodicità da definire a cura dell'utilizzatore.

Raccomandiamo di far eseguire tale controllo da personale qualificato a effettuare l'intervento.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al servizio tecnico assistenza clienti della WUNDER che è a vostra disposizione

Per una migliore e più lunga durata del prodotto e bene eseguire periodicamente una accurata pulizia generale.

La pulizia dello strumento va effettuata con un panno morbido, inumidito con acqua o detergente neutro, evitando l'utilizzo di solventi o sostanze abrasive.

Durante il trasporto, prestare attenzione a non sottoporre lo strumento a urti o eccessive sollecitazioni meccaniche.

In caso di riparazione o assistenza, rivolgersi al proprio rivenditore.

7. CONFORMITA'

STRUMENTO DI PESATURA WUNDER: MODELLO 960A; R150A; RG200A




Si certifica che questo strumento è stato controllato e ha superato positivamente il collaudo funzionale.

Risponde alle seguenti norme e direttive:

2009/23/CE; 93/42/CE; EN45501

8. TARGHETTE IDENTIFICATIVE

Nella targhetta metrologica applicata è indicato l'anno di fabbricazione es 16=2016...e così via.

   <p>Manufacturer: Wunder Sa. Bi. srl Via vecchia per Monza 20 20056 Trezzo sull'Adda (MI) -Italy</p> <p>M 17 CE 0122 Model 960 150A DK 0199.625 Matr. 2705</p> <p>Max 150 kg Min 10kg e = d 1000g +10°C / +40°C</p>	<p>DISPOSITIVO CLASSE Im CON FUNZIONE DI MISURA CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42 CEE</p> <p>CE 0476</p>
   <p>Manufacturer: Wunder Sa. Bi. srl Via vecchia per Monza 20 20056 Trezzo sull'Adda (MI) -Italy</p> <p>M 17 CE 0122 Model R150A DK 0199.625 Matr. 5971</p> <p>Max 150 kg Min 10kg e = d 1000g +10°C / +40°C</p>	<p>DISPOSITIVO CLASSE Im CON FUNZIONE DI MISURA CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42 CEE</p> <p>CE 0476</p>
   <p>Manufacturer: Wunder Sa. Bi. srl Via vecchia per Monza 20 20056 Trezzo sull'Adda (MI) -Italy</p> <p>M 17 CE 0122 Model RG 200 I 07-006 Min 10kg Matr. 0693 +10°C / +40°C</p> <p>Max¹ 100 kg e¹= d 500 g Max² 200 kg e²= d 1000 g</p>	<p>DISPOSITIVO CLASSE Im CON FUNZIONE DI MISURA CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42 CEE</p> <p>CE 0476</p>

9. ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO

Se lo strumento non si dovesse utilizzare, l'ente per l'eliminazione dei rifiuti competente vi darà sui provvedimenti necessari per l'eliminazione a regola d'arte

Quando si decide di non utilizzare più questo articolo, si raccomanda di renderlo inoperante. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti che possono essere causa di fonti di pericolo.

10. GARANZIA

Il presente certificato deve essere conservato fino alla data di scadenza della garanzia.

Esso dovrà essere presentato insieme alla fattura, ricevuta fiscale, o bolla di accompagnamento che riporti il nominativo del rivenditore e la data di vendita ogni volta che si renda necessario un intervento tecnico. Diversamente l'utente perderà ogni diritto di garanzia.

La garanzia ha inizio dalla data di acquisto e ha validità per il periodo previsto dal catalogo/listino vigente.

Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita entro i termini stabiliti, delle parti componenti l'apparecchio che a insindacabile giudizio della casa costruttrice risultassero difettosi all'origine; sarà quindi facoltà della Wunder, riparare o sostituire l'articolo.

La garanzia non copre:

- avarie da trasporto, danni da cadute, danni causati da negligenza e manomissione
- danni per incapacità d'uso dell'apparecchio e uso improprio dello stesso
- danni causati dall'insufficienza o inadeguatezza dell'impianto elettrico o alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o di altra natura
- danni dovuti a errata installazione dell'apparecchio e riparazioni effettuate da personale non autorizzato
- Interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti
- Manutenzione ordinaria e ciò che può essere considerato normale deperimento per uso

Il servizio di intervento può essere inoltre rifiutato quando l'apparecchiatura sia stata modificata o trasformata in qualsiasi modo.

Nel caso di intervento a domicilio l'utente è tenuto a corrispondere il diritto fisso d'uscita, qualora invece l'apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri del Servizio di Assistenza autorizzati Wunder, le spese ed i rischi relativi al trasporto saranno a carico dell'utente.

Wunder non risponde altresì di eventuali danni di qualsiasi natura, che possano derivare direttamente o indirettamente a persone, animali o cose conseguenti all'inosservanza di tutte le istruzioni indicate in questo manuale o comunque derivanti da un uso improprio.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bergamo

11. ASSEMBLAGGIO-UTILIZZO STATIMETRO (OPTIONAL)

PER MODELLO R150A- RG200A

Utilizzo statimetro telescopico meccanico



ATTENZIONE!

PER LA MISURAZIONE DELL'ALTEZZA IL PAZIENTE VA FATTO SALIRE SULLA PEDANA DELLA BILANCIA

RG200A: statimetro telescopico manuale

Figura 1: nell'imballo lo strumento si presenta con il supporto statimetro già montato. Bisogna solo fissare lo statimetro

Figura 1a-1b: fissare lo statimetro misura altezza al supporto in abs nero con la vite nel foro dello statimetro che si trova già avvitata al supporto nero in abs.



Fig. 1



Fig. 1a

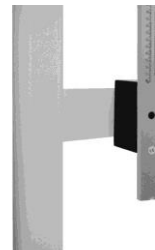
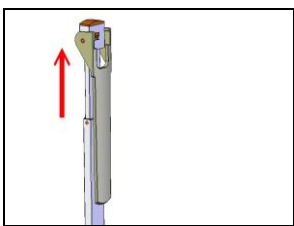
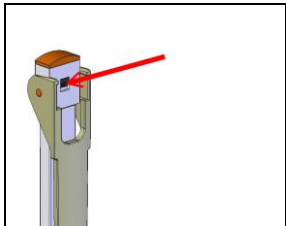
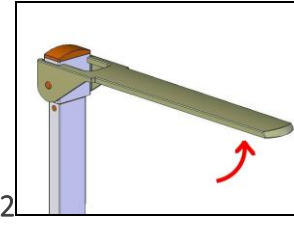
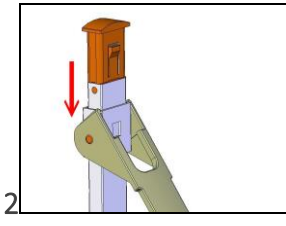
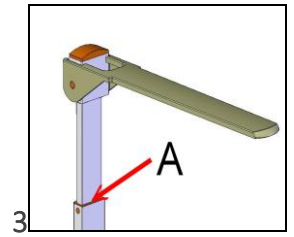
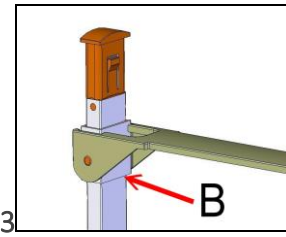


Fig. 1b

UTILIZZO STATIMETRO TELESCOPICO

Misure superiori a 131 cm		Misure inferiori a 130 cm	
1		1	
	Alzare la paletta poggia testa		Abbassare la paletta poggia testa e premere il fermo centrale nero
	Posizionarla orizzontalmente		Tenendo premuto il fermo nero abbassare la paletta poggia testa
	Abbassare l'asta fino al punto in cui la leva poggia testa tocca la testa del paziente. L'altezza può essere letta nel punto 'A'		Abbassare l'asta fino al punto in cui la paletta poggia testa tocca la testa del paziente. L'altezza può essere letta nel punto 'B'.